

Neu: Barcodeetiketten für Laboranforderungen

Telefonische Rückfragen: 0341-6565-175 (Kundenbetreuung)

NEU

The diagram shows a vertical barcode label with the following structure:

- 1:** Points to the top edge of the label.
- 2:** Points to the 'SCHEIN' barcode block.
- 3:** Points to the 'ZUSATZSCHEIN' barcode block.
- 4:** Points to the grid of 13 individual test barcode blocks.
- 5:** Points to the patient information section at the bottom.

0400 000000 SCHEIN		0400 000000 ZUSATZSCHEIN	
0400 000000 01 Probe 1	0400 000000 02 Probe 2	0400 000000 03 Probe 3	0400 000000 04 Probe 4
0400 000000 05 Probe 5	0400 000000 06 Probe 6	0400 000000 07 Probe 7	0400 000000 08 Probe 8
0400 000000 10 Probe 10	0400 000000 11 Probe 11	0400 000000 12 Probe 12	0400 000000 13 Probe 13
Name: 0400 000000	0400 000000	EILT	
Datum: 0400 000000	0400 000000	EILT	
0400 000000 09			
Name:			
Vorname:	Geb.-Datum:		

1. Anordnung der Scheinaufkleber am oberen Rand des Barcodeblockes
2. Kennzeichnungs-Barcode, der für den Auftragschein gedacht ist, Barcode „Schein“
3. Optional zusätzlicher Kennzeichnungsbarcode für den „Zusatzschein“ (bisher Schein 2), z.B. für Einverständniserklärung oder Allergieschein
4. Jetzt **mehr** Probenaufkleber mit neuer Größe
5. Unverändert bleibt die Barcodekennzeichnung für Blutgruppe oder Antikörper mit dem beschrifteten „Barcode-Etikett 09“ mit
 - Name
 - Vorname
 - Geburtsdatum des Patienten(laut Richtlinien der Bundesärztekammer zur „Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten“)

0400 000000 09
Name: Mustermann
Vorname: Max
Geb.-Datum: 01.05.18

Stand 02.05.2018

Die alten Barcoderollen können aufgebraucht werden.

Beschriftung Auftrag für Blutgruppe / Antikörper

1. Nutzung der 7,5 ml EDTA-Monovette
2. Barcode-Kennzeichnung des Auftragscheins mit Barcode „Schein 1“
3. Barcodekennzeichnung der Blutgruppe o. Antikörper mit dem beschrifteten „Barcode-Etikett 9“ mit
 - Patienten-Vorname
 - Patienten-Name
 - Geburtsdatum des Patienten

(laut Richtlinien der Bundesärztekammer zur „Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten“)

A barcode label with the number 075 896015 9. Below the barcode, the text reads: Name: Mustermann, Vorname: Mustermax, Geb.-Datum: 12.12.12. There are red dashed lines and arrows indicating where to tear the label.

A grid of barcode labels for blood group/antibody order. The grid is organized into three rows and three columns. The first row contains labels for 'Schein 1', 'Schein 2', and 'Probe 1'. The second row contains labels for 'Probe 2', 'Probe 3', and 'Probe 4'. The third row contains labels for 'Probe 5', 'Probe 6', 'Probe 7', and 'Probe 8'. Each label has a barcode and a unique number. A red oval highlights the 'Schein 1' label. A red oval highlights the 'Probe 8' label, which has a red box with the text 'EILT' next to it. Below the grid, there is a label for 'Name:' and 'Geb.-Datum:' with a red oval around it.